



TASK Manual de Instruções

SISTEMA WENDIX®



ÍNDICE

1 Descrição	10 Inspeção
2 Apresentação geral	11 Descarte do produto
3 Aplicação	12 Armazenamento
4 Manutenção do manual de instruções	13 Limpeza e desinfecção
5 Treinamento	14 Reparos e manutenção do produto
6 Responsabilidades	15 Vida útil
7 Emergências e resgates	16 Garantia do fabricante
8 Utilização da maca	17 Acessórios e compatibilidade
9 Transporte do produto	18 Produtos relacionados

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

O presente manual contém instruções gerais de uso, operação e cuidados com esse produto. As instruções não são exaustivas. A segurança e utilização apropriada desse produto está exclusivamente ao arbítrio dos seus usuários. Informação de segurança está incluída como uma parte do serviço de resgatistas capacitados. Todas as demais medidas tomadas pelos usuários devem estar dentro e sob consideração dos regulamentos oficiais aplicáveis.

Esse manual não é um manual de primeiros socorros ou técnicas de resgate. Resgatistas devem receber treinamento prévio para o uso apropriado desse produto nos resgates em planos inclinados, resgates em altura e procedimentos de primeiros socorros por instrutores qualificados, antes de utilizar esse produto em uma situação real de emergência.

Aviso de Propriedade - As informações sobre esse produto disponíveis nesse manual são de propriedade da TASK. Todos os direitos sob patentes, designs, manufatura, reprodução e vendas estão reservados.

Produzido no Brasil.

TASK

W1 Perez Segurança do Trabalho Ltda – ME

CNPJ: 10.967.528/0001-98

Address: Av. Rogério Cassola, 896 - Itapeva, Votorantim – São Paulo, Brazil. ZIP CODE: 18116-709

Phone: +55 15 3034-8000

1 Descrição

O Sistema WENDIX® é um dispositivo de ancoragem transportável destinado a utilização como parte de um sistema pessoal de proteção contra quedas. É a solução ideal com inúmeras variações de montagem e tamanho.

O tripé possui fabricação em aço do cabeçote, patas e roseta, garantindo assim maior resistência e confiabilidade durante a utilização. Suas patas são fabricadas em liga de alumínio aeronáutico.

Conta com pintura eletrostática em poliéster (preto) de modo garantir uma resistência química e mecânica maior contra impactos, corrosão e radiação.

O Sistema WENDIX® pode ser montado como TRIPÉ, BIPÉ e MONOPÉ (tubo amarelo + roseta).

Cada pata pode ter de 1 a 3 tubos e variação de Altura de 0,6m a 3,07m em intervalos de 12cm, facilitando a utilização nos locais mais difíceis e diversos.

Com dois robustos cabeçotes:

- Cabeçote Triplo articulado - com 4 regulagens de angulação em cada perna e 9 pontos de ancoragem é utilizado nas configurações de

TRIPÉ e BIPÉ (grande, médio ou pequeno).

- Cabeçote único (Roseta) – sem regulagem e 6 pontos de ancoragem é utilizado na configuração MONOPÉ (tubo reforçado Amarelo).

Os treze pinos de travamento rápido (dez grandes e três pequenos) com esferas em aço inox são conectados ao sistema de modo a serem imperdíveis.

As patas com articulações possuem sola emborrachada e permitem acomodação em superfícies planas ou irregulares, permitindo também que sejam cravadas em solos de consistência moderada, como terra compacta ou gelo, por exemplo.

Além disso, as patas possuem também orifícios que permitem fixá-las ao solo para evitar deslizamento.

Acompanha corrente como sistema de limitação de abertura e fixação das patas. E fitas de estaiamento STABLE para todas as operações do Sistema WENDIX®.

As mochilas confeccionadas em cordura visam garantir a proteção de todos equipamentos durante o armazenamento e transporte.

2 Apresentação Geral

Nome do produto: Sistema WENDIX®

Código do produto: TX-0047

Fabricante: TASK

Razão Social: W1 Perez Segurança do Trabalho Ltda – ME

CNPJ: 10.967.528/0001-98

Endereço: Av. Rogério Cassola, 896 - Itapeva,

Votorantim - SP, 18116-709. Brasil

Telefone/SAC: +55 15 3034-8000

Dimensões:

Altura máxima: 3,07m – resistência: 43kN

Altura mínima: 0,60m – resistência 49Kn

Comprimento da corrente: 14m

Diâmetro dos furos de conexão da cabeça: Ø 20 mm

Dimensão dos furos de conexão da roseta: Ø 20 mmX 44,5mm

Dimensão dos pinos: 95x22mm (pernas) / 56x22mm (cabeça)

Dimensão das bolsas

Grandes tubos: 180 cm x 30cm

Pequenos tubos: 130 cm x 30cm

Costas: 65cm x 45cm x 15cm

Bolsa das correntes: 37cm x 30cm

Carga de Trabalho Segura: 13 kN

Altura mínima: 0,60m

Altura máxima: 3,07m

Peso das bolsas

Mochila 1 - Cabeçote articulado, e Kit de estabilização

Peso total: 11,10kg



Mochila 2 - Bolsa grande: tubos superiores e intermediários, junto com a corrente.
Peso total: 20,30kg



Mochila 3 - Bolsa pequena: tubos inferiores e roseta.
Peso total: 11,40kg



Tripé: 30,7kg
Monopé: 10,7kg
Bipé: 21,5kg





Peso total para transporte: 47kg

Peso da corrente: 6,5kg

Peso da fita de estabilização: 3kg

Materiais

Informações das etiquetas:



Corpo: alumínio aeronáutico

Patas e cabeçotes: aço carbono

Pinos de travamento rápido: em aço inoxidável e alumínio

Corrente: em aço carbono galvanizado a fogo

Mochila: Cordura parte externa e parte interna e fitas em poliéster e lona de PVC

Fita de estabilização: poliéster

Acabamento: pintura eletrostática em poliéster – pintura ecológico

Capacidades: 2 pessoas

Carga de Trabalho segura: 13kN

Carga de Trabalho Máxima: 49Kn

Cor: Preto e amarelo

Informação sobre número de série: na pata do tripé

Componentes

- 1 corrente limitadora das patas de 14 metros
- Fita de estabilização
- Mochilas para transportes

3 Aplicação

O Sistema WENDIX® é destinado à utilização como parte de um Sistema Pessoal de Proteção de Queda para 1 ou 2 pessoas, possuindo aplicação indicada para uma gama de atividades, como acesso e saída a espaços confinados, realização de resgates em ambientes urbanos, industriais e selvagens, içamento de forma

segura, realização de desvio em situações de ambientes com curvas que possam danificar o sistema.

Com as variações independentes de ângulos do cabeçote articulado e pernas intercambiáveis o Sistema WENDIX® se ajustará ao seu ambiente de trabalho ou resgate.

4 Manutenção do manual de instruções

Retenha o presente manual de instruções para referências futuras ou consultas. Esse manual deverá ser guardado com o produto ou próximo do produto e em um lugar fechado e protegido que possa permitir a sua integridade, legibilidade e consulta para todos os seus usuários.

Esteja seguro de que todos os usuários do Sistema WENDIX® tenham completo entendimento das instruções descritas nesse manual e uma clara compreensão sobre o uso correto desse produto.

5 Treinamento

O Sistema WENDIX® somente deve ser utilizada por pessoas previamente treinadas e estritamente de acordo com as informações, avisos e limites estabelecidos nesse manual de utilização.



A falta de leitura e perfeito entendimento das instruções obrigatórias de uso do Sistema Wendex® contidas nesse manual poderá levar os usuários a uma utilização imprópria desse produto.

Organize o registro dos treinamentos de todas as pessoas envolvidas com o uso desse produto.



A utilização imprópria do Sistema WENDIX® por pessoas com ou sem treinamento pode causar acidentes com risco de lesões graves aos usuários e aos pacientes. Utilize esse produto somente dentro das condições previstas nesse manual. Caso não esteja preparado para utilizar este produto, não o utilize.

6 Responsabilidades

Os usuários deste produto assumem integralmente todos os riscos e responsabilidades por acidentes com danos, lesões ou mortes provocados por uma utilização incorreta, indevida ou não permitida pelo fabricante do equipamento. É de suma importância que antes de sua utilização todos estejam formalmente treinados e em situações de resgate, alguém devidamente capacitado para coordenação de uma operação com o uso do Sistema WENDIX®.

7 Emergências e resgates

Resgates em altura com emprego de tripés, cordas e demais equipamentos de resgate são técnicas especializadas e potencialmente perigosas que exigem habilidades especiais daquelas pessoas designadas para essas operações. Nenhuma pessoa designada para uma operação de resgate com a utilização do Sistema WENDIX® deverá participar da operação sem que tenha recebido treinamento prévio por profissionais competentes.

É extremamente recomendável que os resgates verticais em altura com tripés somente devem ser feitos por especialistas. Pratique regularmente o uso do Sistema WENDIX® conforme os protocolos médicos ou regulamentos ou normas oficiais utilizados nos seus serviços regulares de resgate. Os usuários desse produto devem demonstrar habilidade para atendimento de uma vítima.

Antes da utilização do Sistema WENDIX® deverá ser realizada uma avaliação para determinar qual a técnica de resgate será empregada no salvamento de forma segura dentro dos seus limites de uso desse produto.

A avaliação de quais situações o Tripé deverá ser usado deve levar em consideração, como um mínimo, os seguintes fatores: altura, distância, interferência piso, terreno, saliências, lesões do paciente e demais riscos

8 Utilização do Sistema WENDIX®

A utilização do Sistema WENDIX® requer no mínimo 2 (dois) resgatistas. Todavia, a depender do tipo do resgate e lesão da vítima e da forma em que o seu transporte será realizado, poderão ser necessários mais resgatistas.

Este produto e seus componentes não devem ser



Qualquer utilização desse produto de forma diversa ou além do previsto nesse manual será de inteira responsabilidade de seus usuários.

ambientais.

Antes e durante a utilização do Sistema WENDIX® seus usuários deverão estar cientes e compreender como serão efetuadas as medidas de resgate em altura aplicáveis, de forma segura, eficiente e dentro dos seus limites de uso, quando ocorrer alguma emergência que envolva a utilização desse equipamento.

Planos de resgate e as medidas de primeiros socorros deverão estar previamente implementadas e serem de conhecimento dos usuários desse equipamento e das equipes de resgate, de forma a reduzir o tempo de suspensão inerte após a retenção de uma queda.



Protocolos, recomendações e procedimentos médicos não estão amparados pelo presente manual. É de responsabilidade dos usuários desse produto estarem capacitados para aplicação de procedimentos de primeiros socorros ou protocolos médicos específicos para atendimento dos usuários vítimas de acidentes durante o uso deste produto.

utilizados em ambientes com temperaturas inferiores a -40°C ou superiores a 80°C.


Os cuidados de preservação e manutenção básica desse produto são permitidos apenas dentro das condições e orientações descritas nesse manual.

1 TRIPÉ NA MAIOR ALTURA

1. Remova os componentes de suas mochilas de transporte;
2. Teremos 3 tubos em cada perna (3 tubos inferiores, 3 tubos intermediários e 3 tubos superiores);
3. Para o tripé usaremos o cabeçote articulado;
4. Fazer a junção dos tubos inferiores nos tubos intermediários e travar com os pinos imperdíveis;
5. Fazer a junção dos tubos superior nos tubos intermediários e travar os pinos imperdíveis;
6. Fazer a junção dos tubos superiores no cabeçote articulado e travar com os pinos imperdíveis;

7. Seguir esse processo nas três patas;
8. Para ajustes dos tamanhos, pode se optar por regular a angulação no cabeçote ou ajustar altura dos tubos;
9. Após os ajustes o equipamento deve ser estabilizado (correntes nos pés, se preciso aparafusamento das patas no solo ou cravamento e STABLE);
10. Antes de colocar uma pessoa suspensa, verifique se todos os pinos estão travados e os pés estabilizados;



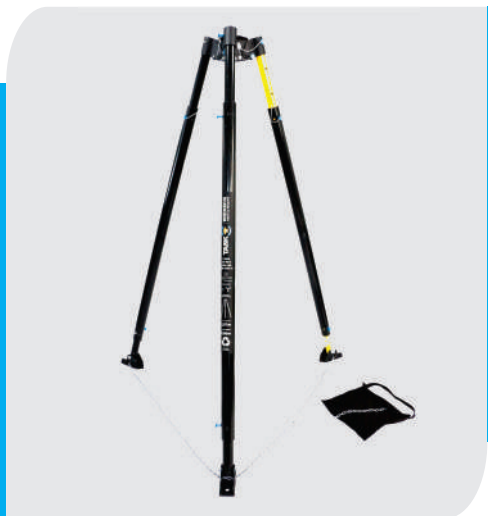

ATENÇÃO

A conexão dos tubos superiores nos tubos intermediários deve ser realizada com o encaixe da face com o furo mais distante da borda.

Não é permitido o ajuste da pata que está presa na parede.

Ao usar o sistema de polias, puxar o ponto de carga sempre para baixo e na vertical, nunca horizontalmente, pois pode desestabilizar o equipamento, a não ser que esteja estabilizado com cintas.



TRIPÉ PEQUENO COM UM TUBO NA PAREDE

1. Remova os componentes de suas mochilas de transporte;
2. Utilizar 3 tubos inferiores e cabeçote articulado; Fazer a junção dos tubos no cabeçote articulado e travar com os pinos.
3. Para a perna que ficará na parede, deve-se conectar o tubo inferior direito no cabeçote articulado devendo permanecer 1 furo aparente entre a junção e a pata. Esta parte do cabeçote articulado deve estar isenta de angulação. As patas que ficarão conectadas no chão devem estar com angulação de 14°.

4. Para ajuste do tamanho, pode se optar por regular a angulação das patas ou através de ajuste de altura com a adequação nos tubos das patas que estão no solo.
5. Após os ajustes o equipamento deve ser estabilizado (correntes nos pés, se preciso aparafusamento das patas no solo ou cravamento e STABLE);
6. Deve ser feito o travamento da perna que está na parede através de aparafusamento.
7. Depois que o Sistema WENDIX é posicionado corretamente e antes de colocar uma pessoa suspensa, verificar se os pinos estão travados e os pés estabilizados.



ATENÇÃO

A conexão dos tubos superiores nos tubos intermediários deve ser realizada com o encaixe da face com o furo mais distante da borda.


Não é permitido o ajuste da pata que está presa na parede.

Ao usar o sistema de polias, puxar o ponto de carga sempre para baixo e na vertical, nunca horizontalmente, pois pode desestabilizar o equipamento, a não ser que esteja estabilizado com cintas.

BIPÉ NO MAIOR TAMANHO

1. Remova os componentes de suas mochilas de transporte;
2. Teremos 3 tubos em cada perna (2 tubos inferiores, 2 tubos intermediários e 2 tubos superiores);
3. Para o bipé usaremos o cabeçote articulado;
4. Fazer a junção dos tubos inferiores nos tubos intermediários e travar com os pinos imperdíveis;
5. Fazer a junção dos tubos superior nos tubos intermediários e travas os pinos imperdíveis;
6. Fazer a junção dos tubos superiores no cabeçote

- articulado e travar com os pinos imperdíveis;
7. Seguir este processo nas duas patas;
8. Para ajustes dos tamanhos, pode se optar por regular a angulação no cabeçote ou ajustar altura dos tubos; Após os ajustes o equipamento deve ser estabilizado com o kit STABLE (se preciso aparafusamento das patas no solo ou cravamento);
9. Antes de colocar uma pessoa suspensa, verifique se todos os pinos estão travados e os pés estabilizados;

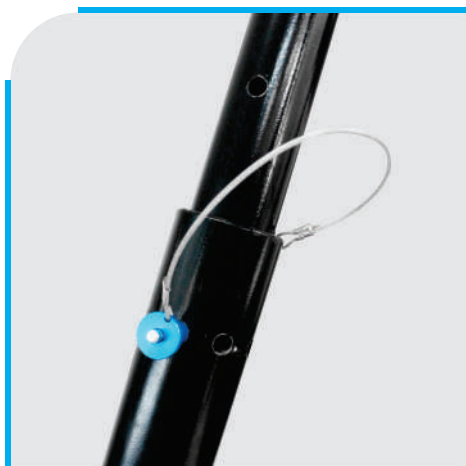





A conexão dos tubos superiores nos tubos intermediários deve ser realizada com o encaixe da face com o furo mais distante da borda.



Ao usar o sistema de polias, puxar o ponto de carga sempre para baixo e na vertical, nunca horizontalmente, pois pode desestabilizar o equipamento, a não ser que esteja estabilizado com cintas.

4 MONOPÉ NO MAIOR TAMANHO

1. Remova os componentes de suas mochilas de transporte;
2. Teremos 3 tubos em uma perna (1 tubo inferior amarelo, 1 tubo intermediário e 1 tubo superior amarelo);
3. Para o monopé usaremos a roseta;
4. A Roseta deverá ser conectada no 2º furo de cima para baixo.
5. Fazer a junção do tubo inferior no tubo intermediário e travar com os pinos imperdíveis;
6. O tubo intermediário deve estar conectado ao tubo inferior na menor altura possível.
7. Fazer a junção do tubo superior no tubo intermediário e travar os pinos imperdíveis;
8. Fazer a junção do tubo superior na roseta e travar com os pinos imperdíveis;
9. Para ajustes do tamanho, pode se optar por ajustar altura dos tubos;
10. Após os ajustes o equipamento deve ser estabilizado com o kit STABLE (se preciso aparafusamento da pata no solo ou cravamento);
11. Antes de colocar uma pessoa suspensa, verifique se todos os pinos estão travados e o pé estabilizado;





ATENÇÃO

Para o monopé, os tubos utilizados sempre serão os de cor amarelo;

Para utilização, deve possuir uma angulação de 70° ($\pm 5^\circ$ com relação ao solo)

A conexão dos tubos superiores nos tubos intermediários deve ser realizada com o encaixe da face com o furo mais distante da borda.


Ao usar o sistema de polias, puxar o ponto de carga sempre para baixo e na vertical, nunca horizontalmente, pois pode desestabilizar o equipamento, a não ser que esteja estabilizado com cintas.


5

UTILIZAÇÃO COM OUTROS EQUIPAMENTOS

O Sistema WENDIX® possui furações em suas cabeças para a conexão de equipamentos como Kit de Estabilização, conectores, anéis, fitas de ancoragem, placas de ancoragem, etc.

Anéis de fita

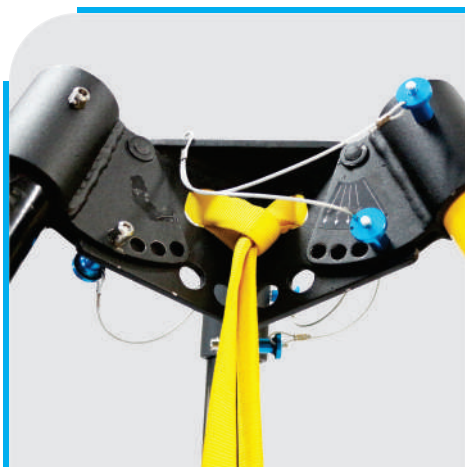


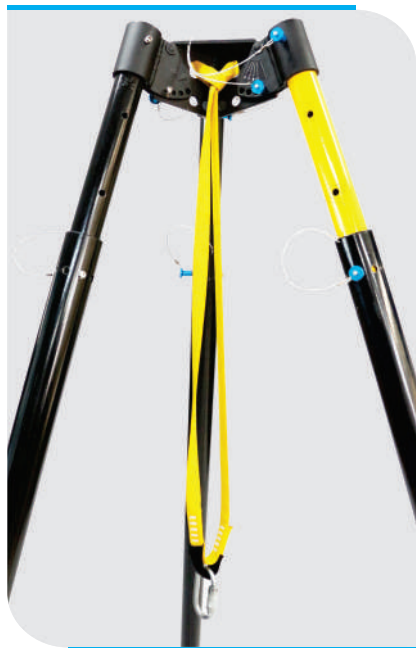

Conectores



Placas de ancoragem

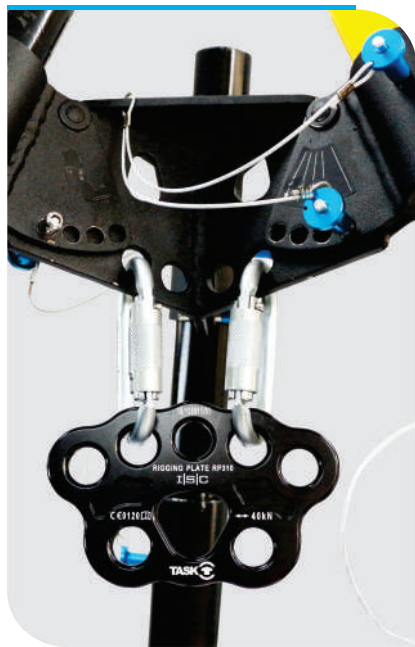


6

PONTO DE ANCORAGEM INCORPORADO AO SISTEMA WENDIX®

Para trabalhos com equipamentos de pre-engenharia ou sistemas de polias para movimentação vertical.



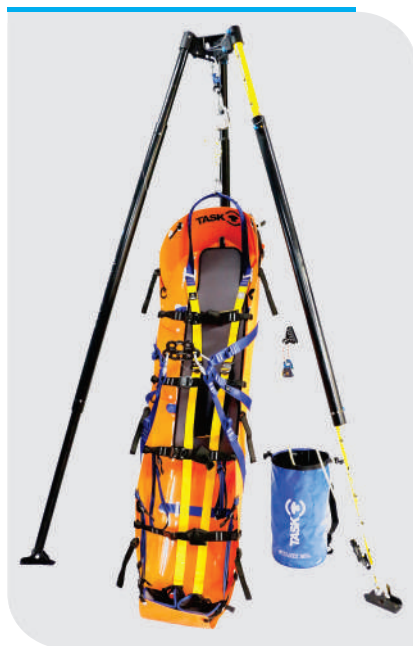



ATENÇÃO

A montagem de qualquer sistema de movimentação ou de pré-engenharia deve ser feita antes da regulagem da

altura e estabilização do tripé. Com exceção do monopé que a montagem do sistema apenas pode ser feita após a estabilização dele.

Ao usar o sistema de polias, puxar o ponto de carga sempre para baixo e na vertical, nunca horizontalmente, pois pode desestabilizar o equipamento, a não ser que esteja estabilizado com cintas.

7

ESTABILIZAÇÃO DO SISTEMA

São consideradas três maneiras de estabilização do Sistema WENDIX, cabe ao profissional capacitado a definição da melhor forma a garantir a segurança do equipamento e usuário.

Corrente

A corrente deve ser utilizada passando pelas furações laterais existentes na pata. O fechamento da corrente deve ser com o conector malha rápida triangular que acompanha o sistema.





Para realizar o fechamento correto, a corrente deve estar bem esticada e seu fechamento deve ser feito o mais próximo ao chão possível para evitar folga.

Estabilização através de fitas: O kit Stable de estaiamento, produto incluso no sistema, o estaiamento é feito através do cabeçote e roseta em algum ponto de ancoragem.

Tripé





Bipé





Monopé







Aparafusamento

Deve ser feito utilizando o furo existente no meio da pata.



9 Transporte do produto

O Sistema WENDIX® pode ser transportada em suas mochilas manualmente, por no mínimo, 2 pessoas, com a utilização das alças de transportes.



Este equipamento não deve ser transportado junto com produtos químicos, equipamentos e materiais contaminados e em recipientes sujos ou que não ofereçam uma adequada proteção durante o transporte.

10 Inspeção

O Sistema WENDIX® deve ser submetida a um programa de inspeções periódicas e rotineiras. Manutenção básica e cuidados com esse produto são permitido somente de acordo com as condições e orientações previstas nesse manual de instruções.

Antes do uso o Sistema WENDIX® deve ser inspecionada por um resgatista treinado. Após cada utilização a pessoa encarregada pela inspeção deverá registrar as condições em que o sistema retornou ao seu

local de guarda. Informações sobre danos ocorridos durante o uso, necessidade de limpeza e de inspeção periódica deverão ser registradas.

Recomenda-se submeter o Sistema WENDIX® a inspeções periódicas por um resgatista usuário em um intervalo de tempo não superior à 6 (seis) meses.

Os seguintes itens devem ser verificados no sistema:

- Todas as partes, componentes e acessórios deverão estar presentes no sistema;
- Todas as etiquetas e marcações deverão estar presentes e legíveis;
- Os pinos imperdíveis devem estar intactos;
- Cortes, rasgos, descosturas, desgaste excessivo, queimaduras, contaminações ou descoloração acentuada nas fitas de estaiamento;
- Trincas, rupturas, queimaduras, desgaste excessivo ou contaminações na estrutura;
- Sinais de oxidação, deformação ou trincas na estrutura metálica das patas, cabeçote e roseta, que comprometa a utilização segura do sistema.

11 Descarte do produto

Quando ultrapassar a sua vida útil, sofrer uma queda durante o uso, contato com substâncias químicas agressivas à estrutura do sistema ou as fitas de estaiamentos, envelhecimento, qualquer dano irreparável à sua estrutura e demais componentes ou ainda ter suas características construtivas originais alteradas ou ter sido utilizado além dos seus limites de uso, o Sistema WENDIX® deve ser inutilizada e descartada.

12 Armazenamento

O Sistema WENDIX® deverá ser armazenada, em local seco, protegido de radiação UV, quimicamente neutro, ventilado e em temperaturas não superiores a 40 C°.

13 Limpeza e desinfecção

O Sistema WENDIX® poderá ser lavado, quando necessário para sua descontaminação, com água em temperatura ambiente (cerca de 30 C°). Quando for necessária a desinfecção use um detergente neutro para remoção de sangue, fluidos corporais, resíduos de óleos, sujeiras ou qualquer outro agente químico agressivo. Após lavar com detergente, enxágue o sistema abundantemente com água limpa para que não fiquem resíduos.



ATENÇÃO

Deverão ser registradas as seguintes informações durante as inspeções: necessidade de limpeza, higienização, desinfecção, manutenção, reparos, substituição de componentes e acessórios, utilização acima de seus limites de uso, caducidade de sua vida útil, neutralização, descarte e necessidade de envio do produto para avaliação do fabricante.



O descarte e neutralização desse produto, por quaisquer uma das razões anteriormente descritas, deverá ser registrado.

Antes de guardar o sistema verifique se está higienizado, desinfetado (quando necessário), seco e acondicionado com todos os seus componentes originais devidamente fixados e conectados.

Após lavar e enxaguar, seque o sistema naturalmente com uma toalha limpa em uma área limpa, ventilada e protegida de fontes de calor, luz solar e radiação UV.

Limpe o sistema utilizando preferencialmente um pano macio. Eventualmente uma escova ou esponja macia poderá ser utilizada para remover sujeiras mais difíceis.



Alguns detergentes e desinfetantes contém alvejantes, fenóis, iodo e cloro, substâncias conhecidamente agressivas aos materiais têxteis. Utilize apenas produtos que não contenham essas substâncias. Consulte sempre os rótulos ou as FISPQ emitidas pelos fabricantes desses produtos.

14 Reparos e manutenção do produto

Modificações nas características construtivas originais do Sistema WENDIX® poderão provocar acidentes envolvendo seus usuários.



ATENÇÃO

São terminantemente proibidas quaisquer modificações nesse produto. Em caso de modificações, reparos ou manutenção o produto deverá ser enviado ao fabricante apenas.

Se o Sistema WENDIX® apresentar sinais de um

desgaste muito excessivo ou apresentar sinais de quebras ou trincas na estrutura de suas patas, a mesma deverá ser retirada de uso. Não estão permitidos reparos ou substituição de materiais neste caso.



ATENÇÃO

Em caso de desgaste fitas de estaiamento, corrente de estabilização, o produto deverá ser enviado para o fabricante para uma avaliação minuciosa. Havendo a possibilidade reparos ou substituição de componentes poderão ser realizadas.

15 Vida útil

A vida útil deste sistema não pode ser expressa em números exatos uma vez que depende de influências externas, assim como: tipo de aplicação, intensidade e frequência de uso e, inclusive, de condições climáticas.

Em condições normais de uso, o Sistema WENDIX® mantém suas características ideais por até 10 anos.

Um sistema novo sem uso mantém suas características originais quando estocada de acordo com as condições especificadas no presente manual de utilização por 5 anos após a sua fabricação.

16 Garantia do fabricante

Este produto possui uma garantia limitada de 1 ano contra defeitos no material ou fabricação. Qualquer defeito observado durante o período de garantia deverá ser informado ao seu fabricante.

A garantia limitada desse produto não inclui cobertura contra envelhecimento natural do produto e seus componentes, uso excessivo, mal uso, descuido, negligência, acidentes ou formas de utilização para as quais este equipamento não está destinado.

17 Acessórios e compatibilidade


Antes de utilizar o Sistema WENDIX® é importante verificar a sua compatibilidade com as técnicas de movimentação vertical em que será aplicada, os equipamentos específicos utilizados na montagem e operação dos sistemas de resgate vertical e com relação ao seu emprego em conjunto com demais acessórios destinados aos cuidados necessários com a vítima.

Os usuários deste produto são responsáveis em avaliar e aprovar a compatibilidade dos equipamentos e acessórios utilizados. Para esta finalidade, treinamento específico poderá ser exigido dos usuários.


Se possível, utilize sempre pontos de ancoragem ou dispositivos de ancoragem que atendam os requisitos legais de sua região (EN 795 ou NBR 16325).

18 Produtos relacionados


Para uma utilização em que seja assegurada a compatibilidade do Sistema WENDIX® com outros produtos, orientamos a sua utilização com os seguintes equipamentos mencionados abaixo:

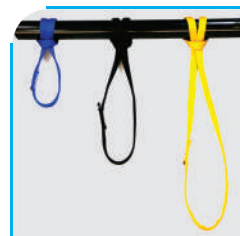


TA-0055 TA-0056 TA-0057
Double Link

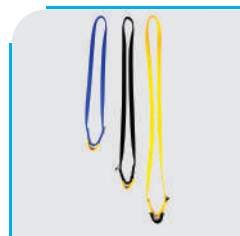


TA-0058 TA-0059 TA-0060
Eye Double Link

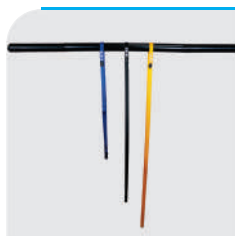


TA-0048 TA-0049 TA-0050
LINK

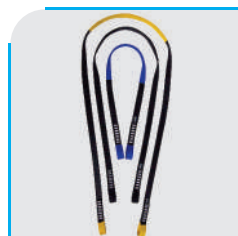


TA-0051 TA-0052 TA-0053
I-SLING

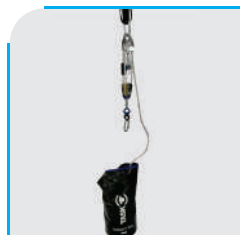


PGA-002
Lift 3

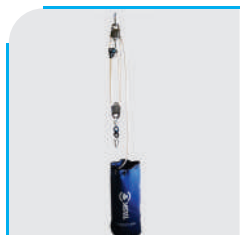

PGA-003
Lift 4

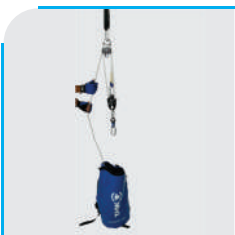

PGA-005
Lock 3

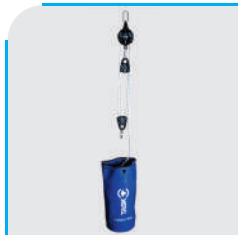

PGA-007
R-ALF Rescue 3



PGA-008
R-ALF Rescue 5



TM-0030
Bullet D



TM-0031
Bullet D Auto



TM-0032
Bullet H



TA-0022
SPIN




TM-0011
Bullet Z




TM-0040
Bullet Z Auto



TM-0020
Triangle 10mm

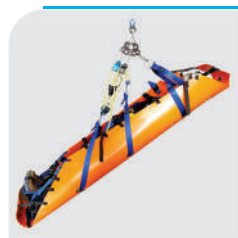


TX-0046 TX-0050
Maca STR PLUS II

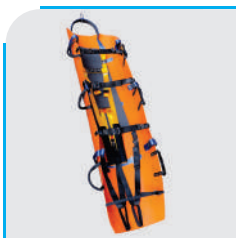


TX-0045 TX-0049
Maca STR WIND




TX-0041 TX-0042
Maca H-STR II

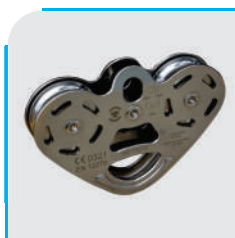

TP-0037
Polia Speed Pro

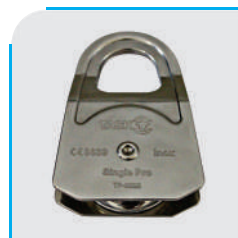

TP-0038
Polia Single Pro

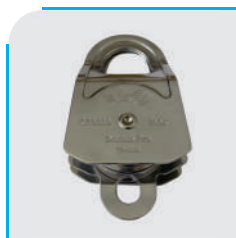


TP-0060
Polia Double Pro




RP-064
Polia Double Prussik




RP-075
Zipspeed Tandem

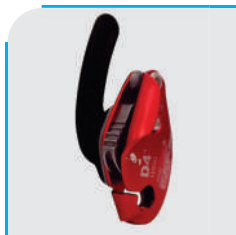

RP-880B
D4

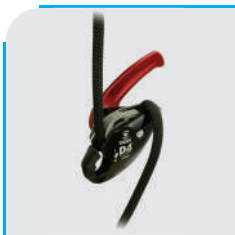

RP-881
D4 PRO

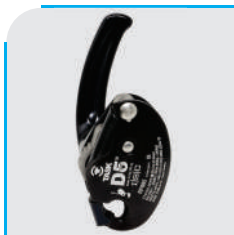

RP-885
D5



TB-0015
Rope Grab



TX-0009
H-Block



Colar cervical
TX-0010 (P) | TX-0011
(M) | TX-0012 (G)



TX-0004
Prancha longa de
polietileno




TX-0008
Ked




Focus
TL-0007 | TL-0006
TL-0005 | TL-0074




Ares
TL-0019

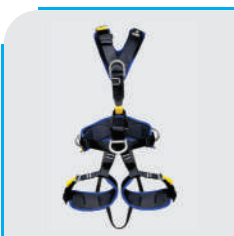

Fivex II
TC-0020 | TC-0018
TC-0019

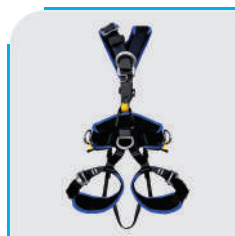

X-Treme II
TC-0031 | TC-0029
TC-0030

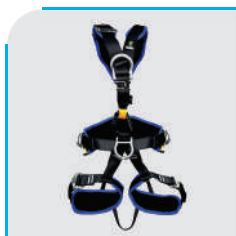

X-Pert II
TC-0016 | TC-0015
TC-0014

ANEXO

MODELO DE INSPEÇÃO E CONTROLE DO PRODUTO

Empresa:		Modelo de inspeção e controle			
Fabricante:		Modelo:		Tipo:	
Nº de Série/Lote:		Fabricação:		Usuário:	
Data de Compra:		Data do primeiro uso:		Data de caducidade:	
Item	Aprovado	Reprovado	Danos identificados	Data	Nome e assinatura do responsável
Tubos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Encaixes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Pinos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Sapatos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Olhal de ancoragem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Kit Stable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Corrente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Cabeçote	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Roseta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marcações	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Caducidade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			